

Sicherheits- und Anwendungshinweise für das Körnerkissen

1. Kälteanwendung:

- Das Kissen soll für 2 Stunden im Gefrierschrank gekühlt werden.
- Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Temperatur angenehm ist und keine Gefahr von Erfrierungen besteht.

2. Wärmeanwendung:

- Mikrowelle: Das Kissen kann für die angegebene Zeit bei 160 °C erhitzt werden. Die genaue Zeit hängt von der Mikrowellenleistung ab und sollte überprüft werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Backofen: Eine Erwärmung im Backofen ist ebenfalls möglich, wobei die angegebene Temperatur genau eingehalten werden muss, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Vor der Anwendung ist die Temperatur zu kontrollieren, um Verbrennungen zu vermeiden.

3. Allgemeine Hinweise:

- Das Kissen sollte immer trocken und sauber gelagert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen oder Rissen im Stoff sollte das Kissen nicht mehr verwendet werden, da die Kerne austreten können.
- Kinder und empfindliche Personen sollten das Produkt nur unter Aufsicht verwenden.

Kontakt Hersteller: iris@handasen.com



