

IEA Medical Blutzuckermessgerät

Anwendung:

- Vorbereitung: Gerät mit AAA-Batterien bestücken, Datum und Uhrzeit einstellen.
- Blutzuckermessung: Stechhilfe vorbereiten, Blutstropfen mit Teststreifen aufnehmen, Ergebnis auf dem LCD-Bildschirm ablesen.
- Nach der Nutzung: Teststreifen auswerfen, Gerät reinigen und ordnungsgemäß lagern.

Warnhinweise:

- Gerät nicht auseinandernehmen oder modifizieren.
- Teststreifen nur einmal verwenden und innerhalb von 90 Tagen nach Öffnen des Behälters.
- Nicht bei extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit nutzen.
- Medizinischen Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
- Bei inkonsistenten Testergebnissen oder Symptomen sofort ärztlichen Rat einholen.

Kontakt-Hersteller:



lilian@acemed.com.tw



BLUTZUCKER- MESSGERÄT

BLOOD GLUCOSE METER

1 BLUTZUCKER-
MESSGERÄT
1 STECHHILFE
50X TESTSTREIFEN
50X LANZETTEN

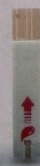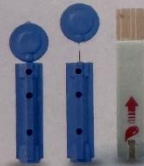

CE 0123

Model:
AM10



**FORTSCHRITTLICHE
BIOTECHNOLOGIE**
EN: ADVANCED BIO-TECHNOLOGY



**GROßES UND LEICHT
ABLESBARES DISPLAY**
EN: LARGE AND EASY-TO-READ DISPLAY



**AUTOMATISCHES EINSCHALTEN
BEIM EINLEGEN DES TESTSTREIFENS**
EN: AUTO POWER-ON
WHEN STRIP INSERTED



GENAUIGKEIT IN 5 SEKUNDEN
EN: ACCURATE RESULT IN 5 SECONDS



**GERINGE BLUTPROBENMENGE
ERFORDERLICH**
EN: SMALL BLOOD SAMPLE SIZE



**ERKENNUNG VON
UNZUREICHENDEN BLUTPROBEN**
EN: UNDERFILLED
BLOOD SAMPLE DETECTION



WARNUNG BEI KETONEN
EN: KETONE WARNING



**EINFACHER AUSWURF DES
TESTSTREIFENS**
EN: STRIP EJECTION DESIGN




BLUTZUCKER- MESSGERÄT


BLOOD GLUCOSE METER



DE: Führen Sie einen neuen Teststreifen in den Messgeräteschacht ein. Das Gerät piept und ein Blutropfensymbol erscheint auf dem Bildschirm.
EN: Insert a new strip into the meter slot, then the meter beeps and the blood drop symbol on the screen.

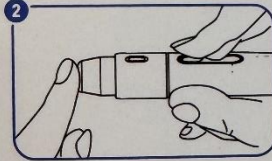

DE: Befüllen Sie die Stechhilfe mit einer Lanzette. Drücken Sie den Knopf.
EN: Fill the lancing device with a lancet and press the button.

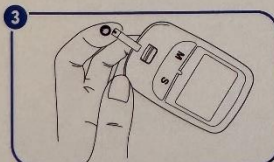

DE: Berühren Sie den Teststreifen mit der Blutprobe an der Streifenkante. Das Blut wird automatisch aufgesaugt. Lassen Sie kein Blut auf den Streifen kommen.
EN: Touch the blood sample at the edge of strip tip. The blood will be sucked automatically. Do not drop blood on the strip.



DE: Das Testergebnis wird in 5 Sekunden angezeigt. Wenn Sie den Teststreifen herausnehmen, speichert das Gerät automatisch den aktuellen Datensatz.
EN: The test result will show in 5 seconds. Put out the test strip, the instrument will automatically store the current record.



IEA International Trading GmbH
Grünwalder Straße 61,
81547 München, Deutschland
Web: www.iea-medical.com
Mail: service@iea-medical.com



MedNet EC-REP GmbH
Borkstraße 10,
48163 Münster, Deutschland



Ace Medical Technology Co., Ltd.
No. 52, Dinghu Rd.,
33378 Guishan Dist.,
Taoyuan City, Taiwan



2024.04.15



2029.04.16



202404001



STERILE



WARNING!



TEMPERATURGRENZE
(-40 BIS 55°C)



(01)04260764170876
(11)240417
(17)290416
(10)202404001
(21)AMTGCF2440613

**BLUTZUCKER-
MESSGERÄT**
BLOOD GLUCOSE METER



**BLUTZUCKER-
MESSGERÄT**
BLOOD GLUCOSE METER



4 260764 170876