

# Sicherheits- und Anwendungshinweise für IEA Green Insektenstichheiler CH3000B

## Sicherheitshinweise:

- **Nicht geeignet für:** Kinder unter **3 Jahren**, Personen mit **Diabetes**, Hautentzündungen, offenen Wunden oder Fieber.
- **Vorsicht:** Nicht auf Schleimhäuten, Narben oder gereizter Haut anwenden. Maximal **5 Anwendungen pro Stunde** auf derselben Stelle.
- **Akku:** Nur mit dem mitgelieferten **Typ-C-Kabel** laden, nicht während des Ladevorgangs verwenden. Gerät trocken halten.

## Anwendung:

1. **Vorbereitung:** Haut reinigen, Gerät mit **Typ-C-Kabel** vollständig aufladen.
2. **Einschalten:** Funktionsknopf gedrückt halten (LED-Anzeige leuchtet grün).
3. **Modus wählen:**
  - **Modus 1 (blau):** 3 Sek. für empfindliche Haut.
  - **Modus 2 (violett):** 6 Sek. für normale Haut.
4. **Anwendung:** Gerät auf die betroffene Stelle setzen, nach Signal entfernen.
5. **Nach der Nutzung:** Reinigen & trocken lagern.

**⚠ Bei starken Reaktionen oder anhaltenden Symptomen Arzt aufsuchen!**

**Kontakt Hersteller:** [service@e-caretalk.com](mailto:service@e-caretalk.com)



**IEA International Trading GmbH**  
 Grünwalder Straße 61,  
 81547 München, Deutschland  
 Web: [www.iea-medical.com](http://www.iea-medical.com)  
 Mail: [service@iea-medical.com](mailto:service@iea-medical.com)



**Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**  
 Eifelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany  
 Tel: 0049-40-2513175  
 Fax: 0049-40-255726



**Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.**  
 Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng  
 Industrial Estate Xiixiaobaimang 518108  
 Nanshan District, Shenzhen P.R. China.  
 Tel: 0086-755-27652316  
 E-mail: [service@e-caretalk.com](mailto:service@e-caretalk.com)



7000ha  
 10000ha  
 10%  
 70%  
 55°C  
 -10°C

REF 0592  
 MD

MADE IN PRC



MIX  
 Packaging | Supporting  
 responsible forestry  
 FSC® C167422




**IEA International Trading GmbH**  
 Grünwälder Straße 61,  
 81547 München, Deutschland  
 Web: [www.iea-medical.com](http://www.iea-medical.com)  
 Mail: [service@iea.medical.com](mailto:service@iea.medical.com)



**Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**  
 Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany  
 Tel: 0049-40-2513175  
 Fax: 0049-40-255726




**Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.**  
 Floor 1-2, No. 3 Building, Fenshen Xusheng  
 Industrial Estate Xijixiaobaimang 518108  
 Nanshan District, Shenzhen P.R. China.  
 Tel: 0086-755-27652316  
 E-mail: [service@e-caretalk.com](mailto:service@e-caretalk.com)

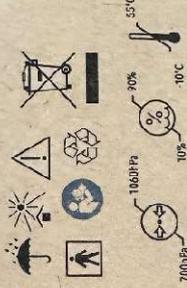

REF 0592  
 MD

MADE IN PRC

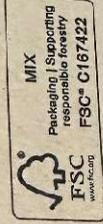

MIX  
 Packaging / Stapelring  
 responsible for FSC  
 FSC® C167422



**BITE GONE**  
**INSEKTEN-**  
**STICHHEILER**  
BITE GONE  
INSECT BITE HEALER




**IEA International Trading GmbH**  
 Grünwalder Straße 61,  
 81547 München, Deutschland  
 Web: [www.iea-medical.com](http://www.iea-medical.com)  
 Mail: [service@iea-medical.com](mailto:service@iea-medical.com)



**Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**  
 Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany  
 Tel: 0049-40-2513175  
 Fax: 0049-40-255726



**Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.**  
 Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng  
 Industrial Estate Xilixiaobamang 518108  
 Nanshan District, Shenzhen P.R. China  
 Tel: 0086-755-27652316  
 E-mail: [service@e-caretalk.com](mailto:service@e-caretalk.com)

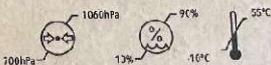

REF 0592

MD

MADE IN PRC







4 260764 171040




(0)106926408711236  
(1)1241289  
(10)24109031

ANWENDUNG/APPLICATION:

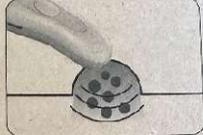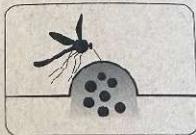

Schnelzlinderung  
nach dem Insektenstich  
Pain relief after insect bites

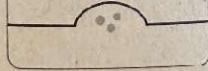



# BITE GONE INSEKTEN- STICHHEILER


BITE GONE  
INSECT BITE HEALER

EINSCHALTEN  
UND AKTIVIEREN  
SWITCH ON  
AND ACTIVATION

Modus 1



Modus 2

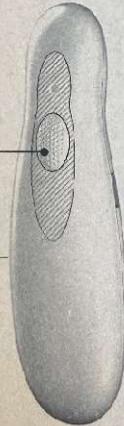

## INHALT /CONTENT

1x Bite Gone Insektensticheiler  
EN: 1x Bite Gone Insect bite healer

1x Gebrauchsanweisung  
EN: 1x Instruction manual

1x USB-C Kabel (Inklusive)  
EN: 1x USB-C cable (included)

### Betriebsbedingungen:


10°C bis 40°C, RH (Relative Luftfeuchtigkeit) 30% - 75%, 700hPa - 1060hPa  
Lagerbedingungen: 10°C bis 55°C  
RH (Relative Luftfeuchtigkeit) 10% - 90%, 700hPa - 1060hPa

### Operating conditions:

10°C to 40°C, RH (Relative Humidity) 30% - 75%, 700hPa - 1060hPa  
Storage conditions: 10°C to 55°C, RH (Relative Humidity) 10% - 90%, 700hPa - 1060hPa


### Maximale Temperatur: 51°C ± 2°C

Programm 1: 3 Sekunden / 51°C (LED leuchtet blau)  
Programm 2: 6 Sekunden / 51°C (LED leuchtet lila)

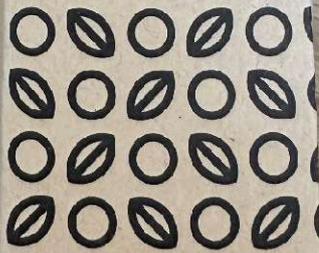

**BITE GONE**  
**INSEKTENSTICHHEILER**  
BITE GONE INSECT BITE HEALER

**BITE GONE  
INSEKTEN-  
STICHHEILER**  
BITE GONE  
INSECT BITE HEALER

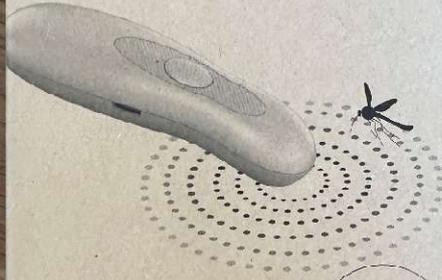

SCHNELL  
UND WIRKSAM  
BEI INSEKTEN-  
STICHEN

 **FREI VON CHEMISCHEN STOFFEN**  
EN: FREE FROM CHEMICAL SUBSTANCES

 **HANDLICHES DESIGN**  
EN: SMALL & PORTABLE

 **VORHEIZPHASE**  
EN: PREHEATING

CE 0598

IP22

Model:  
CP3003

