

## **IEA Medical Tablettenzerteiler**

### **Anwendung:**

- **Vorbereitung:** Tablette in die vorgesehene Halterung des Zerteilers legen.
- **Zerteilen:** Deckel des Zerteilers schließen und fest herunterdrücken, um die Tablette zu teilen.
- **Nach der Nutzung:** Zerteilte Tablette entnehmen und Rückstände aus dem Zerteiler entfernen.

### **Warnhinweise:**

- Nur für geeignete Tabletten verwenden; ungeeignet für beschichtete, zu harte oder ungeeignete Tablettenformen.
- Zerteiler von Kindern fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nach jeder Nutzung reinigen, um Rückstände zu entfernen und Kreuzkontamination zu verhindern.

### **Kontakt-Hersteller:**

- [leslie@nb-bluesky.com](mailto:leslie@nb-bluesky.com)



# **TABLETTEN- ZERTEILER**



# TABLETTE- ZERTEILER



DE - TABLETENZERTEILER  
EN - PILL CUTTER

FR - SÉPARATEUR DE COMPRIMÉS  
ES - SEPARADOR DE TABLETAS  
IT - DIVISORIO PER PILLOLE

**ZERTEILEN**

EN: Dividing · FR: Découper  
ES: Dividir · IT: Dividere

**ZERKLEINERN**

EN: Shredding · FR: Broyer  
ES: Trituración · IT: Triturazione

**AUFBEWAHREN**

EN: Storage · FR: Conserver  
ES: Almacenamiento · IT: Conservazione

**SICHERES MATERIAL**

EN: Safe material · FR: Matériel sûr  
ES: Material seguro · IT: Materiale sicuro

**DOPPELTER SCHUTZ**

EN: Double protection · FR: Double protection  
ES: Doble protección · IT: Doppia protezione

**HANDLICHE GRÖÖE**

EN: Handy size · FR: Taille pratique  
ES: Tamaño manejable · IT: Formato pratico



## TABLETTENZERTEILER

PILL CUTTER · SÉPARATEUR DE COMPRIMÉS  
SEPARADOR DE TABLETAS · DIVISORIO PER PILLOLE



**IEA International Trading GmbH**

Grünwalder Straße 61,  
81547 München, Deutschland

Web: [www.iea-medical.com](http://www.iea-medical.com)

Mail: [service@iea-medical.com](mailto:service@iea-medical.com)



**Wellkang Ltd**

Enterprise Hub, NW Business Complex,  
1 Beraghmore Rd, Derry, BT48 8SE,  
Northern Ireland, United Kingdom



**Ningbo High-Tech Bluesky**

**Manufactory & Trading Co., Ltd.**

Rm201, Building B, Hongtai Plaza,  
No.55 Haiyan North Rd  
Ningbo 315042, China



 20240620  
 24060001  


