

# **Sicherheits- und Anwendungshinweise für die Home EyeSpa Augenmaske**

## **Die Hinweise gelten für alle Produktgrößen und Varianten**

### **1. Anwendung:**

- Nach dem Öffnen beginnt die Maske sich automatisch auf etwa 40°C zu erwärmen und bleibt für ca. 20 Minuten warm.
- Die Maske mit der weißen Seite und der Einkerbung nach unten auf die Augen legen und mit den Ohrenschlaufen befestigen.
- Nicht direkt nach der Anwendung von Augentropfen verwenden.
- Nach Gebrauch die abgekühlte Maske im Hausmüll entsorgen.

### **2. Sicherheit:**

- Nicht bei verletzter Haut, Schwellungen, Ausschlag oder anderen Hautproblemen im Augenbereich anwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Vor Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen schützen.
- Bei ungewöhnlicher Hitzeempfindlichkeit oder medizinischen Augenbehandlungen vor der Nutzung einen Arzt konsultieren.

**Kontakt Hersteller:** [info@intco.com](mailto:info@intco.com)



**Home EyeSpa**



#### **Warnhinweise**

Nicht verwenden bei verletzter Haut, starken Schwellungen, Ausschlag oder anderen medizinischen Hautproblemen im Augenbereich. Konsultieren Sie vorab einen Arzt oder Apotheker, falls Sie ungewöhnlich auf Hitze reagieren oder medizinische Augenbehandlung erhalten.

Ausserhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise.

Aufbewahrung: Vor Sonnenstrahlung, hohen Temperaturen und Hitzequellen schützen.

Nicht benutzen, wenn Verpackung beschädigt ist.

#### **Inhaltsstoffe**

Außeres Material: Polyester

Wärmezelle: Eisenpulver, Aktivkohle, Vermiculit-Extrakt, Natriumchlorid, Wasser.

IEA MEDICAL ist eine Marke der IEA International Trading GmbH.  
Grünwalder Straße 61, D-81547 München  
T: +49-89-4520503-0  
E: info@iea-medical.com



### Dein Home EyeSpa

- Die duftende Maske wird bis zu 40 °C erwärmt und hilft bei Entspannung
- In nur 20 Minuten fühlen sich deine Augen frischer und ausgeruhter an
- Weiche und sanfte Maske für eine bessere Entspannung und einen besseren Schlaf

### Anwendungshinweise

- Bitte beachte die Warnhinweise
- Augenmaske aus der Einzelverpackung nehmen, Maske beginnt sich nach der Öffnung aus dem Beutel automatisch gleichmäßig zu erwärmen
- Die Augenmaske bleibt für ca. 20 Minuten warm
- Direkt nach dem Öffnen verwenden
- An den perforierten Stellen auseinanderreißen
- Weiße Seite auf die Augen legen mit der Einkerbung nach unten
- Ohrenschlauf um die Ohren legen
- Nicht direkt nach der Nutzung von Augentropfen verwenden
- Maske kann Makeup verschmieren oder entfernen
- Abgekühlte Maske nach dem Gebrauch im Hausmüll entsorgen



**Vor dem  
Schlafengehen**




**Auf  
Reisen**



**Für die  
Ruhepause**

# Home EyeSpa

5x

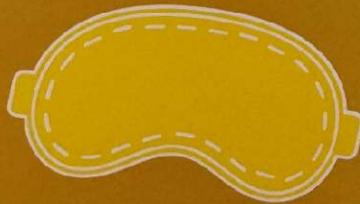

mit  
Kamillenduft

Diese wärmende Augenmaske wird deine  
Augen auf Entspannungsreise bringen.