

IEA Medical Medikamentenbox

Anwendung:

- **Befüllen:** Tagesdosierer seitlich aus dem Magazin schieben und die Fächer (morgens, mittags, abends, nachts) mit den erforderlichen Medikamenten füllen.
- **Entnahme:** Deckel des Tagesdosierers entsprechend der Zeit öffnen und Medikamente entnehmen. Deckel schließen und Dosierer ins Magazin zurückschieben.
- **Reinigung:** Tagesdosierer leeren, Deckel entfernen und alle Teile reinigen. Nach vollständigem Trocknen wieder befüllen und einsetzen.

Warnhinweise:

- Vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Nur vollständig getrocknete Teile wiederverwenden.
- Nicht benutzen, wenn Teile beschädigt oder geöffnet sind.

Kontakt-Hersteller:

- leslie@nb-bluesky.com



MEDIKAMENTENBOX

MEDICATION BOX - BOÎTE À MÉDICAMENTS
CAJA DE MEDICAMENTOS - SCATOLA DEI MEDICINALI



IEA International Trading GmbH
Grünwalder Straße 61
D-81547 München

Mail: info@iea-medical.com
Phone: +49 (0) 89-4520503-0



Verifica le disposizioni del tuo Comune




2028/12/24

JIANXU HANGJIAN INDUSTRI CO., LTD. SHANGHAI
JIANXU STREET, SHANGHAI CITY, JIANGSU, CHINA

REF: 20231225
LOT: 01251223
EC REP

DE - Inhalt: 100% Baumwolle, Wizenkerne
EN - Ingredients: 100% cotton, woyen cores
FR - Ingrédients: 100% coton, noyaux de wizen
IT - Ingredienti: 100% cotone, anime essute
ES - Ingredientes: 100% algodón, núcleos sejados

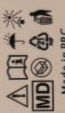

Made in PRC


Romani's S.L., Calle de Alhama 55,
1D, Madrid 28038 Spain




MEDIKAMENTENBOX



DE - MEDIKAMENTENBOX
EN - MEDICATION BOX
FR - BOÎTE À MÉDICAMENTS
ES - CAJA DE MEDICAMENTOS
IT - SCATOLA DEI MEDICINALI

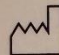 20240620
LOT 24060001
MD



IT

PAP
CARTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune





MEDIKAMENTENBOX

MEDICATION BOX · BOÎTE À MÉDICAMENTS
CAJA DE MEDICAMENTOS · SCATOLA DEI MEDICINALI



7 TAGE ORGANISATION
EN - 7 days organization
FR - Organisation de 7 jours
ES - Organización de 7 días
IT - Organizzazione di 7 giorni



SEHR ÜBERSICHTLICH
EN - Very clear
FR - Très clair
ES - Muy claro
IT - Molto chiaro



LEICHT ZU ÖFFNEN
EN - Easy to open
FR - Facile à ouvrir
ES - Fácil de abrir
IT - Facile da aprire



SICHER VERSCHLOSSEN
EN - Securely locked
FR - Fermé en toute sécurité
ES - Cierre seguro
IT - Bloccato in modo sicuro



HOHE QUALITÄT
EN - High quality
FR - Haute qualité
ES - Gran calidad
IT - Alta qualità



FREI VON BISPHENOL A
EN - Free from bisphenol A
FR - Sans bisphénol A
ES - Sin bisfenol A
IT - Senza bisfenolo A