

IEA Medical Insektenstichheiler IBR30

Anwendung:

- Gerät sofort nach dem Insektenstich anwenden.
- Modus 1: 47°C für 3 Sekunden, geeignet für empfindliche Haut.
- Modus 2: 50°C für 6 Sekunden, für normale Haut.
- Gerät nach Signalton von der Haut entfernen.

Warnhinweise:

- Nicht bei Diabetes, empfindlicher oder verletzter Haut, Fieber oder Empfindungsstörungen verwenden.
- Keine Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren oder ohne Aufsicht bis 12 Jahre.
- Nicht auf Augen, Schleimhäuten oder feuchter Haut anwenden.
- Arzt konsultieren bei Hauterkrankungen oder anhaltenden Symptomen.
- Gerät von Kindern fernhalten und nicht als Ersatz für ärztliche Beratung verwenden.

Kontakt-Hersteller:

- marketing@aojmedical.com



